

Lady

materassi ortopedici ed ergonomici

Manuale d'uso

 Lordflex's Srl
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)



Lady

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.

La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.

Cordialmente Le auguriamo buon riposo.

Lady

Manuale Utente

INDICE

| | |
|---|---|
| 1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA | 4 |
| 3. SIMBOLI UTILIZZATI | 4 |
| 4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO | 5 |
| 5. INSTALLAZIONE E USO | 5 |
| 6. ETICHETTE | 6 |
| L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura: | 6 |
| 7. PULIZIA | 7 |
| 8. SMALTIMENTO | 7 |
| 9. GARANZIA..... | 7 |

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;

2. DESTINAZIONE D'USO

Il materasso oggetto del presente manuale di istruzioni ha caratteristiche ortopediche ed è pertanto particolarmente indirizzato a utilizzatori con stati dolorosi o patologici a livello ortopedico, nonché per il riposo e la degenza di pazienti.

3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità rispetto al regolamento comunitario 2017/745/CE sui dispositivi medici

4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

Lady è un materasso ortopedico destinato a utilizzatori con problematiche della colonna vertebrale o comunque ortopediche e è anche adatto per il riposo e la degenza di pazienti (non avendo comunque capacità antidecubito). Esso è realizzato in molle insacchettate indipendenti e espansi flessibili. È particolarmente studiato per il mantenimento della portanza e elasticità nel tempo oltre che per assicurare il comfort dell'utilizzatore. L'anima del dispositivo è composta da molle insacchettate e poliuretano espanso flessibile con 850 molle insacchettate nella misura matrimoniale assemblati insieme per formare un'unico dispositivo.

I materassi sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza da cm 80 a cm 180

Lunghezza da cm 190 a cm 200

Incremento della misura pari a 5 cm

Sono disponibili realizzazioni fuori misura su richiesta.

5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione del materasso è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il materasso sopra alla rete del letto.

Per un corretto uso del materasso occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta.


Lady

6. ETICHETTE

Il materasso è identificato dalla seguente etichetta posizionata sopra al materasso stesso.



L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:

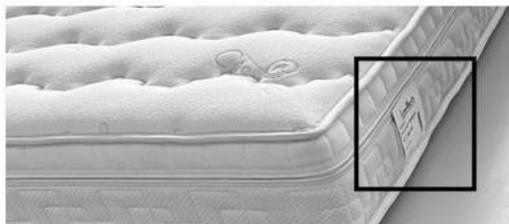

7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso. Non immergete il materasso in acqua.
In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il materasso ad ogni cambio paziente. Pulizia della fodera di rivestimento come da indicazioni riportate in etichetta prodotto

8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce il materasso contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del materasso, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's , farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente. In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.