


Sonny

materassi ortopedici ed ergonomici

Manuale d'uso

 Lordflex's Srl
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)



Sonny

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.

La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.

Cordialmente Le auguriamo buon riposo.

Sonny

Manuale Utente

INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI	4
4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO	5
5. INSTALLAZIONE E USO	5
6. ETICHETTE	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:	6
7. PULIZIA	7
8. SMALTIMENTO	7
9. GARANZIA.....	7

Sonny

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;
- Rimuovere la fodera di rivestimento del materasso soltanto per operazioni di pulizia/disinfezione dello stesso.

2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale d'uso è un materasso per la prevenzione delle piaghe da cubito di primo stadio, per terapia a lungo termine e domiciliare e per il trattamento di stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.

3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità rispetto al regolamento comunitario 2017/745/CE sui dispositivi medici

Sonny

4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

Sonny è un materassi studiato appositamente per ridurre gli strati dolorosi dovuti alla postura. È realizzato in poliuretano espanso flessibile, con materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto, e strato superficiale in memory foam.

L'anima del dispositivo è composta da poliuretano espanso flessibile con canali passanti e viscoelastico schiumato ad acqua assemblati insieme per formare un unico dispositivo.

I materassi sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza da cm 80 a cm 180

Lunghezza da cm 190 a cm 200

Incremento della misura pari a 5 cm

Sono disponibili realizzazioni fuori misura su richiesta.

5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione del materasso è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il materasso sopra alla rete del letto.

Per un corretto uso del materasso occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta.


Sonny

6. ETICHETTE

Il materasso è identificato dalla seguente etichetta posizionata sopra al materasso stesso.



L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:

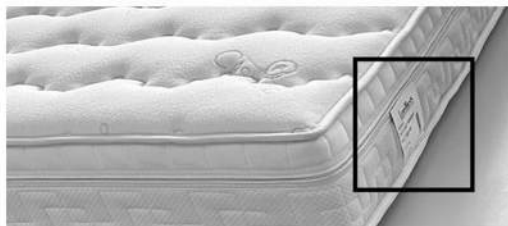

Sonny

7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso. Non immergete il materasso in acqua. In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il materasso ad ogni cambio paziente. Pulizia della fodera di rivestimento come da indicazioni riportate in etichetta prodotto

8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce il materasso contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del materasso, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's , farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente. In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.